



心肺復甦法及 自動體外心臟去顫器使用方法



HEART GUARDIAN

01



立刻尋求協助，撥打999並要求準備AED(心臟去顫器)

- 施救者需要輕拍患者的肩膀，並大聲呼喊
- 患者沒有意識，或者沒有正常呼吸，立刻撥打999並要求準備AED(心臟去顫器)



02



立刻開始心肺復甦法

- 施救者雙手十指交叉，對準按壓點以每秒2次的頻率快速、準確地反復按壓
- 若施救者熟知急救操作流程，可按照30:2胸部按壓與人工呼吸比率施行急救



03



開啟AED電源，並貼上電擊墊

- 當AED到達後，立刻開啟電源，並根據圖示正確地把電擊墊貼在患者身上
- 患者若為幼童，則需在前胸中央和背部中央各貼上一片電擊墊



04



根據語音指示實施電擊

- 若語音播放“請勿接觸患者，現在進行分析”等提示，則必須立刻遠離患者
- 若語音播放“建議電擊”提示，則立刻按下閃爍中的橙色電擊掣



05



立刻重新施行胸部按壓

- 按下電擊掣後，立刻重新施行胸部按壓
- AED每2分鐘重複分析患者心律，施救者根據AED語音指示操作
- 繼續進行心肺復甦法，直至救護員到達或患者有活動徵狀



Technology for Life

RADIAN QBio



www.aed-cosltd.com.hk